

Masque de protection en tissu



Matériel fourni :

- Tissu extérieur et intérieur : coton blanc
- Couche Interne : poly coton blanc (matière légèrement plus épaisse)
- Élastique souple


Matériel non fourni :

Merci d'utiliser du fil blanc

Le masque est composé de 3 couches : 2 couches de coton et une couche de poly coton.
Tous les tissus utilisés sont prévus pour résister à un lavage fréquent à 90°.
Pour chaque masque il y a 6 pièces de tissu : 4 en coton et 2 en poly coton (couche interne).
Les pièces de tissu sont déjà découpées à dimensions, les marges de couture de 1 cm sont comprises.
Le fil élastique doit être coupé: 2 morceaux de 30 cm environ pour chaque masque.

Étapes de fabrication (compter 10 à 15 minutes par masque)


1. **Assemblage de l'extérieur du masque :**
Assembler 2 pièces de coton ensemble, sur la partie courbe uniquement.

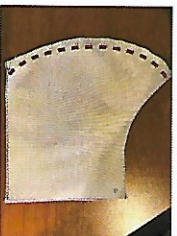

2. **Assemblage de l'intérieur du masque :**
Assembler 2 pièces de coton ensemble, sur la partie courbe uniquement.



3. **Assemblage de la couche interne du masque :**
Assembler 2 pièces de poly coton ensemble, sur la partie courbe uniquement.

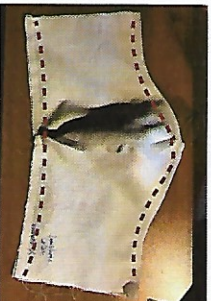

4. **Assemblage des 3 parties du masque :**

1. la partie interne en poly coton
2. la partie extérieure du masque (endroit vers vous)
3. la partie intérieure du masque (endroit contre endroit)

Coudre uniquement le haut et le bas : ne pas coudre les petits côtés.

5. **Retourner** sur l'endroit. Surpiquer le haut et le bas, à quelques mm du bord.



6. Sur l'un des petits côtés, **faire un premier petit ourlet de 5mm** (vers l'intérieur du masque), puis un second d'environ 1,5 cm et faire une couture pour former la coulisse de l'élastique.

Répéter l'opération de l'autre côté.

La coulisse doit être assez large pour faire passer l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice ou d'une grosse aiguille.



7. **Faire passer l'élastique**, faire un nœud et rentrer le nœud dans la coulisse (pour le confort).